



Veloped stokholder – Monteringsvejledning

2-delt stokholder til Veloped, der også fungerer som sikkerhedsstrop, når Veloped foldes til transport eller opbevaring. Stokholderen passer til alle Veloped modeller.

Scan QR-koden med din smartphone eller enhed for at se videoinstruktioner.



① Fastgør den bagerste holder.

Vikl den bagerste holder rundt om den øverste del af det bagerste lodrette stelrør lige under den højdejusterende quick-release.

② Træk remmen stramt.

Træk stroppen stramt, vikl den om stelrøret og fastgør den med velcroen. Lad den overskydende længde af stroppen hænge frit.

③ Juster den bagerste løkke.

Størrelsen på den bagerste løkke kan justeres ved at løsne velcrolukningen. Du skal muligvis forsigtigt klemme løkken for at få en afrundet/cirkulær form.

④ Fastgør den forreste holder.

Størrelsen på den forreste løkke kan justeres ved at løsne velcrolukningen. Du skal muligvis forsigtigt klemme løkken for at få en afrundet/cirkulær form.

⑤ Juster den forreste løkke.

Størrelsen på den forreste løkke kan justeres ved at løsne velcrolukningen. Du skal muligvis forsigtigt klemme løkken for at få en afrundet/cirkulær form.

⑥ Sæt vandrestaven på.

Fastgør vandrestaven ved at skubbe den bagfra, først gennem den bageste holder og derefter gennem den forreste holder.



⑦ Fastgør rammen.

Du kan bruge stokholderstroppen til at sikre stellet, når det er foldet, når du transporterer eller opbevarer din Veloped.