



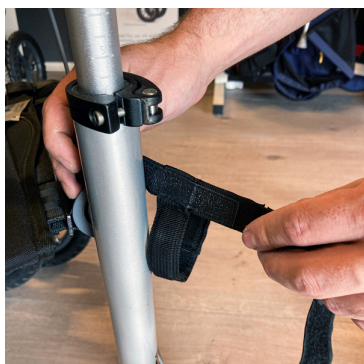

## Veloped storkholder – Monteringsvejledning

2-delt storkholder til Veloped, der også fungerer som sikkerhedsstrop, når Veloped foldes til transport eller opbevaring. Storkholderen passer til alle Veloped modeller.

Scan QR-koden med din smartphone eller enhed for at se videoinstruktioner.

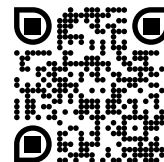

### ① Fastgør den bagerste holder.

Vikl den bagerste holder rundt om den øverste del af det bagerste lodrette stelrør lige under den højdejusterende quick-release.



### ② Træk remmen stramt.

Træk stropen stramt, vikl den om stelrøret og fastgør den med velcroen. Lad den overskydende længde af stropen hænge frit.



### ③ Juster den bagerste løkke.

Størrelsen på den bagerste løkke kan justeres ved at løsne velcrolukningen. Du skal muligvis forsigtigt klemme løkken for at få en afrundet/cirkulær form.



#### ④ Fastgør den forreste holder.

Størrelsen på den forreste løkke kan justeres ved at løsne velcrolukningen. Du skal muligvis forsigtigt klemme løkken for at få en afrundet/cirkulær form.



#### ⑤ Juster den forreste løkke.

Størrelsen på den forreste løkke kan justeres ved at løsne velcrolukningen. Du skal muligvis forsigtigt klemme løkken for at få en afrundet/cirkulær form.



#### ⑥ Sæt vandrestaven på.

Fastgør vandrestaven ved at skubbe den bagfra, først gennem den bageste holder og derefter gennem den forreste holder.



#### ⑦ Fastgør rammen.

Du kan bruge stokholderstroppen til at sikre stellet, når det er foldet, når du transporterer eller opbevarer din Veloped.