



Manual: Trionic kabellås



① Find skruen på beslaget.



② Skru skruen løs med en 4 mm unbrakonøgle.




③ Træk enden af remmen ud af beslaget.



④ Vikl stroppen rundt om Velopeds bageste lodrette rammerør (på Walker det semi-lodrette rammerør).



⑤ Sæt enden af stroppen ind i beslaget.

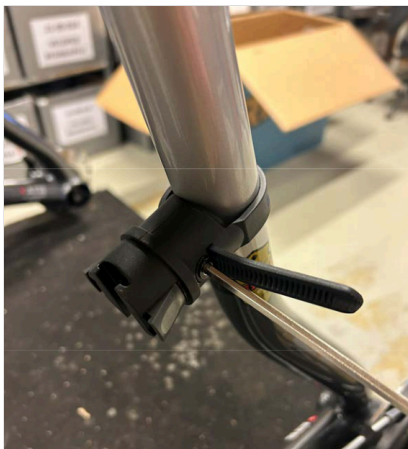


⑥ Spænd skruen/remmen med 4 mm unbrakonøglen, indtil remmen er stram.




⑦ Skær det overskydende stykke af stroppen af med en kabelskærer eller kniv.



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⑧ Billedet viser den korrekte fastgørelse af beslaget.



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⑨ Fastgør kabellåsen til beslaget ovenfra, og skub kabellåsen nedad, indtil den klikker på plads i beslaget.



⑩ For at afmontere kabellåsen fra beslaget skal du trykke på de to grå knapper og fjerne låsen fra beslaget.