

Veloped flaskeholder – monteringsvejledning


Veloped og rollator Universal flaskeholder, der fastgøres til Veloped-stellet med en skruet klemme. Farve: sort.

Leveringen inkluderer en flaskeholder, klemmebeslag og en 3 mm unbrakonøgle.


Scan QR-koden med din smartphone eller enhed for at se videoinstruktioner.



① Skru en skrue af og fjern den fra klemmebeslaget.

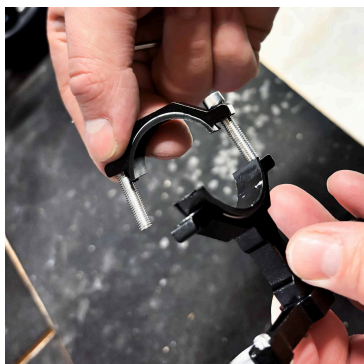

② Skru den anden skrue så langt ud som muligt, men lad den blive fastgjort til klemmen.

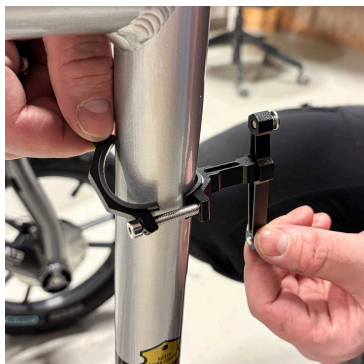

③ Drej den ene halvdel af klemmen 90 grader for at gøre det nemmere at montere klemmen på Veloped-stellet. Med flaskeholderens korte arm opad, fastgør klemmen til den lodrette del af det højre eller venstre bagerste stelrør på Veloped'en. Når du skruer klemmen fast på Veloped-stellet, skal du sørge for, at begge skruer er spændt lige meget.



④ Løsn de to skruer på klemmeslaget, og skru derefter flaskeholderen fast, helst med flaskeholderens sideåbning udad.



⑤ Veloped-flaskeholderne er nu korrekt monteret og klar til brug. Godt klaret.