



Walker stokholder – monteringsvejledning

2-delt stokholder, der fastgøres til håndtaget og rammen på Walker. Den øverste del har en smart hurtiglåsfunktion, og stokken kan hurtigt fastgøres og fjernes. Passer til rollatorerne Walker 9er, 12er og 14er.

Scan QR-koden med din smartphone eller enhed for at se videoinstruktioner.



- ① Drej den øverste holder, så logoet vender opad.



- ② Klik holderen fast på den øverste del af håndgrebsrøret.

Klik holderen fast på den øverste del af håndgrebsrøret, og skru den derefter på plads med en stjerneskruetrækker.




- ③ Hvis du fastgør både stokholderen og ryglænet

Bemærk: Juster bremsegrebets position, så der er plads til den øverste stokholder ved siden af ryglænet. Det kan være nødvendigt at vippe stokholderen udad, cirka 30 grader, for at den passer til stokholderen og ryglænet på Walker.




④ Fastgør den nederste holder til rammen

For montering i højre/venstre side skal du dreje den nederste holder, så du kan nå skruen fra ydersiden af stellet. For at fastgøre den nederste holder til stellet skal du vikle stroppen omkring rammerøret og skubbe den ind i hullet i holderen.

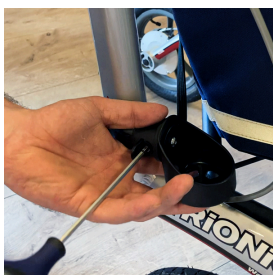

⑤ Spænd skruen/remmen

Spænd skruen/remmen med en 4 mm unbrakonøgle.

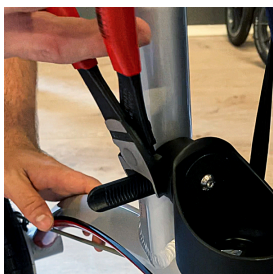

⑥ Klip den overskydende længde af remmen af

Skær den overskydende længde af stroppen over med en kabelsaks.



⑦ Klar til brug