



## Manual: Montering af flaskeholder på Walker 12er størrelse S




① Samlingssted for flaskeholderen (H eller V).



② Vikl stroppen rundt om rammerøret og træk den gennem holderen.



③ Stram remmen, og drej møtrikken med uret for at stramme den.

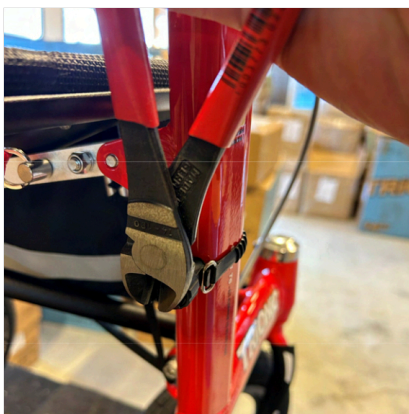

④ Klip den overskydende rem af.



⑤ Monter den anden holder på samme måde.



⑥ De to holdere er korrekt monteret på rammerøret.



⑦ Fastgør flaskeholderen med de to skruer. Flaskeholderens "åbning" skal vende udad.



⑧ Flaskeholderen er nu fastgjort til rammen, og du sætter flasken ind fra siden og fjerner den udad.