



Trionic Walker Rygpude – Samlevejledning



Den ergonomiske og polstrede rygpude, lavet af vandafvisende og holdbar 600D polyester, passer til rollatorerne Walker 9er, 12er og 14er. Den byder på komfortabel og sikker støtte, når man sidder.

Længden/dybden på rygpuden er justerbar. VIGTIGT:

① Skru af.

Fjern skruerne og møtrikkerne fra de to klemmer.

② Fastgør ryglænet.

Åbn klemmerne en smule og sæt dem fast på griberørerne. **Vigtigt:** Sørg for at "TRIONIC" logoskriften er placeret korrekt, da rygpuden er vinklet.



③ Helt op.

Skub de to klemmer helt op til toppen. Du kan være nødt til at løsne skruen på bremsehåndtaget for at bevæge den lidt bagud.





④ fastgør ryglænet.

Med en unbrakonøgle på 4 mm skal du fastgøre begge klemmer med skruer og møtrikker. Stropperne på rygpuden skal pege fremad ved påsættelsesstedet.

⑤ Dette foto viser den korrekte montering.



Inden rollatoren foldes ud.

For at folde rollatoren sammen skal du vinkle rygpuden opad.

Om nødvendigt.

Hvis du synes, at ryglænet er for kort/for langt, kan du justere længden. Fjern de to skruer og møtrikker, og monter derefter ryglænet igen.

