



Walker Transportpose – Pakningsinstruktioner


Walker transportposen består af en hovedtransportpose og en mindre opbevarings-/bæreposse. Transportposen passer til alle Walker-modeller.

Transportposen passer til alle Trionic Walker-modeller.




① Åbn hovedposen

Åbn lynlåsen på opbevaringsposen og pak hovedtransportposen ud.

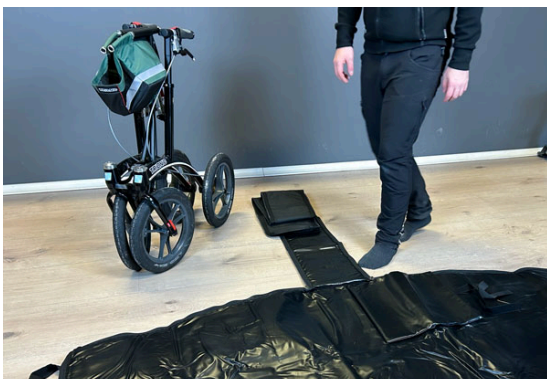


② Spred hovedposen.

Åbn hele længden af hovedposens lynlås og fold posens flapper ud på gulvet.

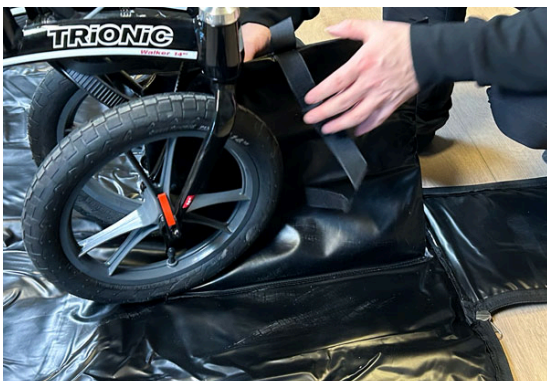


③ Placer rollatoren på tasken.

Placer Walkeren på centersektionen af hovedtransportposen. Hovedposen har en integreret polstret beskyttelsesflap med en Velcro-strop. Træk den polstrede beskyttelsesflap opad og placér den mellem forhjulsforgafflerne for at beskytte lakken.

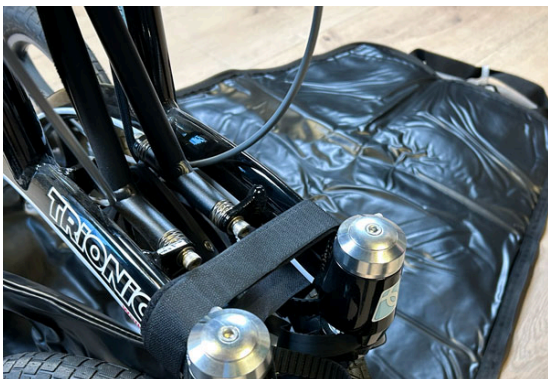

④ Sikr den foldede ramme med den integrerede Velcro-strop.

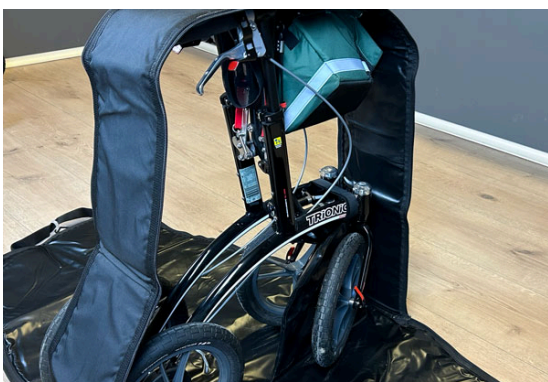

⑤ Fold centerflappen over Walkeren.



⑥ Løft sideflapperne og luk hovedlynlåsen.



⑦ Dette billede viser Walkeren, som er korrekt pakket.

Pakkevejledning



Scan QR-koden med din smartphone eller enhed for at se videoinstruktioner.